

Výkon dezinfekce EcaCin ve zdravotnických zařízeních

<i>Dezinfikované plochy / předměty</i>	<i>Způsob dezinfekce</i>	<i>Koncentrace pracovního roztoku</i>	<i>Doba působení</i>
<i>Dezinfekce ploch v souvislosti s COVID-19 doporučujeme maximální ředění 50%</i>			
Podlahy	otěrem	5%	15 min
Malé plochy / stěny	postřikem, otěrem	5%	15 min
Ovzduší / plochy	zvlhčovač vzduchu mlha	koncentrát	dle m ³
WC, sprchy, odtoky, umyvadla, koše na odpadky, kliky, postele apod.	postřikem, otěrem	5%	20 min
Předsterilizační příprava	ponořením	5%	30 min
Teploměry	ponořením	koncentrát	10 min
Hračky	ponořením, postřikem	koncentrát	10 min
Toaletní potřeby pacientů	ponořením, postřikem	koncentrát	10 min
Bílé nádobí	ponořením	koncentrát	10 min
Prádlo	přídavek do předpírky	koncentrát	10 min
Chladničky	otěrem, postřikem	koncentrát	10 min
Dopravní prostředky (sanity)	otěrem, postřikem	5%	15 min
Pracovní obuv	otěrem, postřikem	50%	10 min
Pracovní pomůcky na úklid	otěrem, postřikem	50%	10 min
Kontejnery na rozvoz stravy	otěrem, postřikem	5%	15 min
Výkon sanitárních dní	otěrem, postřikem, zvlhčovač vzduchu - mlha	50% koncentrát	10 min dle m ³